

COVID -19 Antigen Schnelltest (Selbsttest)


Schritt 1: Vorbereitung
Material bereitlegen, Deckel abnehmen



Schritt 2: Vorbereitung
Tupfer oben öffnen




Schritt 3: Abstrich
Tupfer einführen, bis ein **leichter Widerstand spürbar** ist (ca. 2cm), mit leichtem Druck gegen die Nasenwand **5x drehen**; im zweiten Nasenloch wiederholen
Maske wieder anziehen!

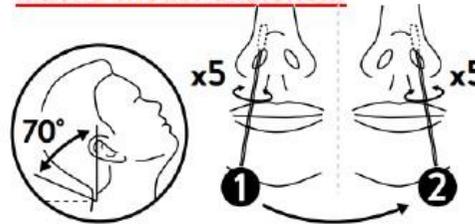

Schritt 4: Tupfer in Röhrchen
Tupfer in Röhrchen stecken, **in der Flüssigkeit schwenken** und ca. 5x gegen den Boden/die Wand drücken



Schritt 5: Tupfer ausdrücken
Tupfer bis in die Mitte des Röhrchens rausziehen, **Röhrchen beim Tupferkopf zusammendrücken, Tupfer abbrechen** und Röhrchen mit **Deckel** verschließen

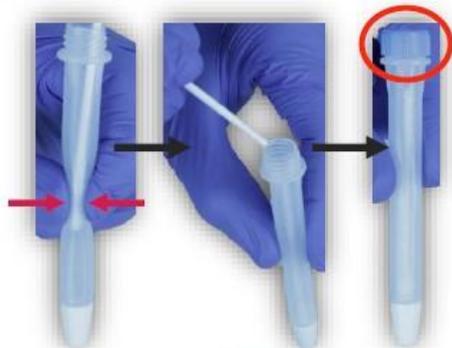


Schritt 6: Flüssigkeit auf Testkassette
Testkassette öffnen, untere Kappe (weiß) des Röhrchens öffnen und **5 Tropfen** in die **runde Probenvertiefung** tropfen



Schritt 7: Auswertung
Strich nur bei C → Test negativ
Strich bei C & T → Test positiv

Wichtig: Der Test ist nicht 100%ig genau; es gibt **falsch-positive** (ca. 2%) und **falsch-negative** Ergebnisse.

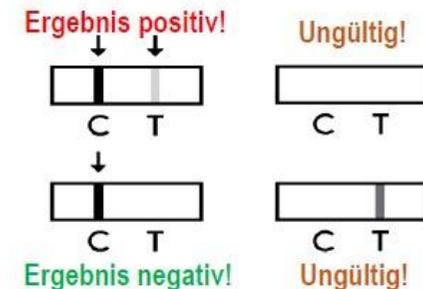

Müll erst beim Rausgehen in den Restmüll vorne, beim Rausgehen Hände desinfizieren!